

GENO | DIET®



INSTRUKCJA WYKONANIA BADANIA

ZESTAW ZAWIERA:


- a) Deklarację Świadomej Zgody na wykonanie badania genetycznego oraz Deklarację Świadomej Zgody na przetwarzanie danych osobowych.
- b) Trzy patyczki wymazowe do pobrania próbki materiału genetycznego Pacjenta.
- c) Trzy kapsułki zawierające płyn.
- d) Jedną przezroczystą kopertę, w której należy umieścić pobraną próbkę materiału genetycznego.
- e) Jedną naklejkę służącą do zamknięcia pudełka transportowego.
- f) Jedną kartę informacyjną z indywidualnym kodem badania.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY


W celu przeprowadzenia badania, niezbędne jest podanie w Deklaracji Świadomej Zgody na wykonanie badania następujących danych:

- a) **Imię i nazwisko, płeć, adres, numer telefonu, data urodzenia i nr PESEL.**
- b) Adres e-mail, na który zostanie przesłany wynik badania.
- c) Data i podpis pacjenta lub prawnego opiekuna w przypadku dzieci do 18 roku życia na Deklaracji Świadomej Zgody na wykonanie badania.
- d) Data i podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego w przypadku dzieci do 18 roku życia na Deklaracji Świadomej Zgody na przetwarzanie danych osobowych.


POBRANIE I TRANSPORT

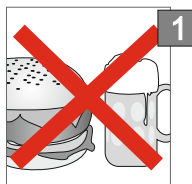

1 Wymagane jest powstrzymanie się od jedzenia, picia, palenia papierosów oraz żucia gumy przynajmniej przez 60 minut przed pobraniem próbki materiału genetycznego.

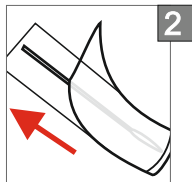

2 Należy wyjąć pierwszy patyczek wymazowy z opakowania. UWAGA: w celu uniknięcia zanieczyszczenia próbki, końcówka patyczka wymazowego może mieć kontakt jedynie z powierzchnią, z której pobierany jest materiał DNA.

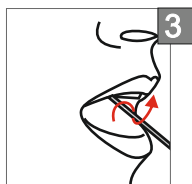

3 W celu pobrania próbki materiału genetycznego, należy potrzeć patyczkiem wymazowym wewnętrzną stronę policzka, obracając wymazówkę 5-6 razy.

4 Po pobraniu, należy otworzyć kapsułkę z płynem i zanurzyć w niej wymazówkę na 30 sekund, a następnie zamknąć kapsułkę. Powtórzyć kroki 3 i 4 przy użyciu pozostałych patyczków wymazowych i kapsułek.

UWAGA: Należy upewnić się, że kapsułki zostały prawidłowo i szczelnie zamknięte.

5 Po pobraniu materiału genetycznego, należy umieścić w foliowym opakowaniu i zamknąć je.

6 Patyczki wymazowe wyrzucić.

7 Kapsułki znajdujące się w foliowej kopercie należy umieścić w pudełku transportowym.

8 Następnie należy wypełnić Deklarację Świadomej Zgody na wykonanie badania oraz na przetwarzanie danych osobowych.

9 Wypełnione formularze należy umieścić wraz z kapsułkami w pudełku transportowym, a następnie zamknąć je przy pomocy znajdującej się w zestawie naklejki.

10 Kartę z indywidualnym kodem badania należy zachować w celu ewentualnego porównania z otrzymanym wynikiem.

